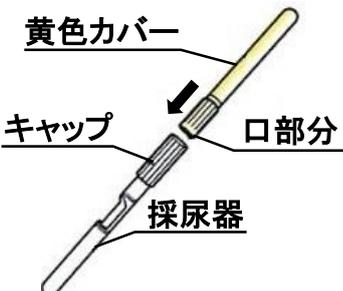
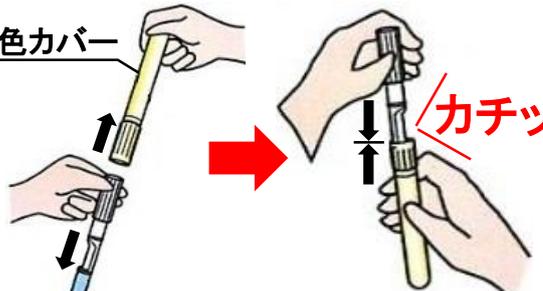


ピー・ポールⅡの使い方

<p>①</p>	<p>黄色カバーをまっすぐ抜き取ります。</p>	
<p>②</p>	<p>口部分をキャップの中にしっかり差し込みます。</p>	
<p>③</p>	<p>黄色カバーを持って放尿中の尿に<u>採取口</u>をあてると尿がとれます。 ※尿が取りづらい場合は、紙コップなどを使用してください。</p>	
<p>④</p>	<p>尿を採取後、黄色カバーを抜き取り、元に戻します。 (カチッと音が出るまで) しっかり奥まで差し込んでください。</p>	
<p>⑤</p>	<p>ラベルを袋のキリトリ線から離し、裏の銀色テープをはがして容器に巻き付けて貼ってください。</p>	